



# Cateter para Remoção de Trombos - Cleaner

Argon Medical Devices



## Cleaner

Cateter de remoção de trombos é um dispositivo baseado num cateter percutâneo 6 fr ou 7 fr de peça única, disponível nos tamanhos de 65 cm para extremidade superior ou necessidades de curto alcance e 135 cm para acesso poplíteo/ femoral ou outras necessidades de longo alcance. A unidade manual de acionamento rotativo é descartável e alimentada à bateria, que está ligada a um fio sinusoidal que gira a cerca de 4000 RPM. O formato sinuoso do fio facilita a suave desaglutinação mecânica da obstrução de fistulas.

## Indicações de Uso

O CLEANER é indicado para a remoção mecânica de coágulos e para a infusão controlada e seletiva de fluidos especificados pelo médico, incluindo trombolíticos, na vasculatura periférica/ enxertos de diálise AV.

## Características

- ❖ O fio e a ponta a traumática são radiopacos e permite a visualização por fluoroscopia;
- ❖ O design do eixo de transmissão melhorado aumenta a eficiência de transferência de energia e torque;
- ❖ Amplitude de fio sinusoidal de 9 mm ideal para remoção de trombo aderente à parede em pequenos lúmens;
- ❖ Design de perfil baixo (0.035 ", 6F) assemelhasse ao design do fio-guia permite uma excelente orientabilidade através da tortuosidade dos vasos.

## Especificações e características técnicas

Componentes	Composição
Dispositivo	ABS, Nylon, Poliuretano, PEBAX, PTFE, aço inoxidável, Loctite 431, Espuma de borrada de silicone e Silicone.
Tubo de Proteção	PVC DEHP free
Torneira	Polycarbonato, HDPE, Silicone e corante.

**Esterilização:** Óxido de etileno

**Validade:** 3 anos

**Atenção:** Produto para única utilização. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar, caso contrário comprometerá a integridade estrutural do dispositivo e/ou dar origem a uma falha do dispositivo que, por sua vez, pode resultar em lesões, doenças ou morte do paciente, além do risco de contaminação do dispositivo e infecções cruzadas entre os pacientes.

Cateteres Argon - caixa com 01 unidade		
N° de Catálogo	Dimensões fr x cm	Amplitude do fio sinusal
700009XT	6 fr x 65 cm	9 mm
700109XT	6 fr x 135 cm	9 mm
700015	7 fr x 65 cm	15 mm
700115	7 fr x 135 cm	15 mm

Reg. ANVISA n° 10337850108

